

EN

**Application:**

Pillow cover with sliding surface and handles. Facilitates positioning of pillow when moving user higher up in bed or to sitting position on edge of bed.

**Max load:**

100 kg.

SE  
NO  
DK

**Avsedd användning/beregnet bruk/beregnet brug:**

Kuddfodral/putetrekk/pudevår med glidyta/glideflate/glideflade och handtag. Underlättar/letter ved positionering/Forenkler ved plassering av kudde/pute/pude, vid förflyttning högre/høyere opp i säng/høyere op i sengen eller till sittande på sängkant.

**Max Load:**

100 kg.

DE

**Vorgesehene Verwendung:**

Kissenbezug mit Gleitfläche und Handgriff. Erleichtert das Positionieren des Kissens, das Bewegen zum Kopfende des Betts oder das Aufsetzen an der Bettkante.

**Max. Belastbarkeit:**

100 kg.



**Checking functionality:**

Check regularly that seams and tapes are intact and undamaged. Test functionality by imposing a load and checking that they withstand it. If damage has occurred, the product must be discarded.


**Kontroll av funktion:**

Kontrollera regelbundet/jevnlige/jævnligt att sömmar/sømme och band är hela och fria från skador. Testa funktionen genom att belasta och kontrollera att de håller. Om skador uppstår/er opstået skall produkten kasseras.

**Funktionskontrolle:**


Regelmäßig kontrollieren, dass Nähte und Bänder intakt sind und keine Schäden aufweisen. Funktion durch Belasten testen. Prüfen, dass keine Schäden auftreten. Ggf. das Produkt ausrangieren.

# Manual

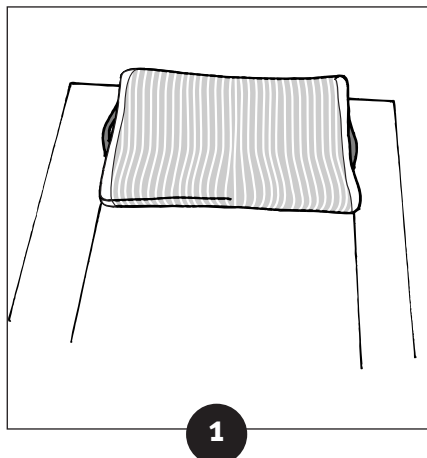

### Positioning:

Insert a pillow into the pillow cover. The smooth surface must be at the bottom of the bed. When using the handles, position the pillow so that the handles are in position above the shoulders, see Illustration 2.


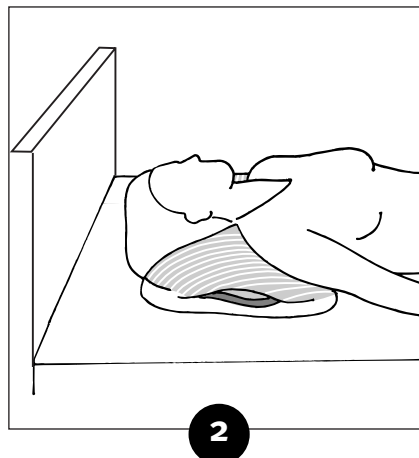


### Placering:

Placera en kudde/pute/pude i kuddfodralet/putetrekket/pudevåret. Den glatta ytan/flaten/flade skall ligga nedåt i sängen. Vid bruk av handtagen placeras kudden/puten/puden så att handtagen ligger i position över skulderpartiet, se bild 2.

### Platzierung:

Stecken Sie ein Kissen in den Bezug. Die glatte Oberfläche muss im Bett nach unten gedreht sein. Bei Verwendung der Handgriffe ist das Kissen so zu platzieren, dass die Handgriffe oberhalb des Schulterbereichs liegen. Siehe Abb. 2.

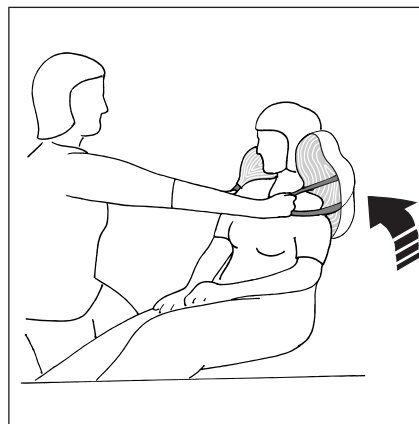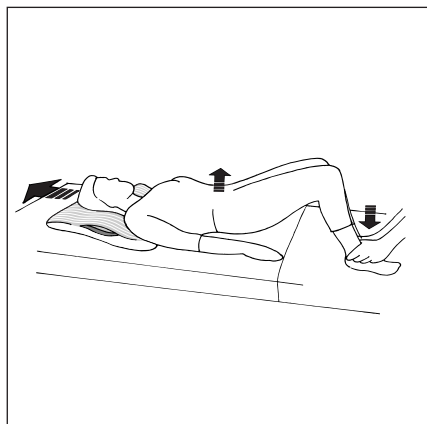

### Information:

For further information, contact your specialist in transfer, our representative or [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Ensure that you always have the latest version of the manual. It can be downloaded from our website: <http://www.romedic.com/manuals.htm>

Vid behov av/for ytterligare information, kontakta er/jeres/deres specialist i förflyttningsteknik/flytteteknik, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Se till/pass på/sørg for att du alltid har den senaste versionen av manualen. Den finns att ladda ned/kan lastes ned/kan hentes ned från vår hemsida/hjemmeside; <http://www.romedic.com/manuals.htm>

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachmann für Bewegungstechnik, unseren Vertreter oder unter [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Kontrollieren Sie, dass die letzte Version der Bedienungsanleitung zugänglich ist. Diese kann von unserer Homepage heruntergeladen werden: <http://www.romedic.com/manuals.htm>